



# ラップオン・ブリオ

最新の自動ラップ式排泄処理ユニットを搭載した「ラップオン・ブリオ」。

ラップオンベーシックモデルです。

普通便座 **98,780**円(税込)

やわらか便座 **101,750**円(税抜)

## 椅子は使用者に合わせて

ご使用者の体型や使用状況に合わせて、椅子を調節できます。



### 移乗に便利

ベッドからの移乗がスムーズに行えるように、左右の肘掛がネジで取り外せます。




### 肘掛2段調整

使う方の体格や症状に合わせて高さ調節ができます。  
(21・24cm)




### 2タイプの便座

通常のPP製の便座の他に、長時間座る方や、おしりのやさしい心地のやわらか便座もご用意しています。

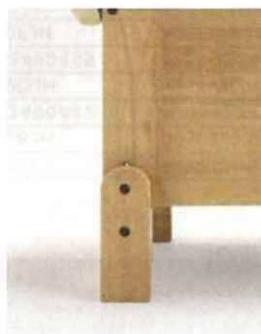

### 3段階調整の脚

体型やお好みに合わせて座面の高さが3cm毎に3段階の調節ができます。  
(40・43・46cm)

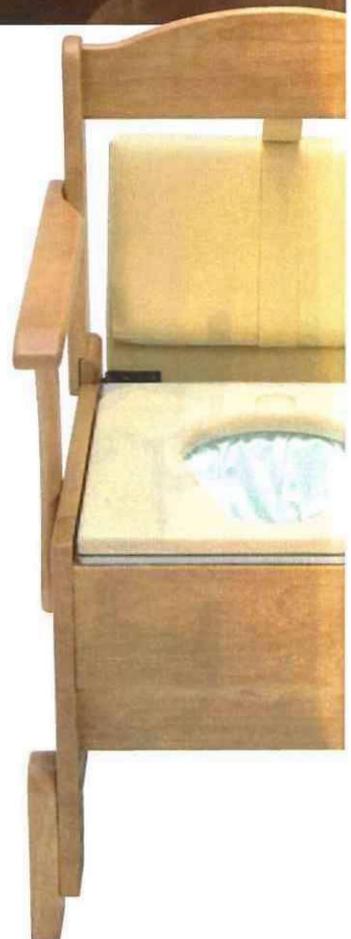


## 自動ラップ処理ユニットとは

水を使わず、熱圧着によって自動で排泄物と臭いを密封するため、パケツ洗浄がいりません。また、音声案内が搭載されているため、更に使いやすくなりました。

### 自動ラップ処理の仕組み

#### 1. 処理開始

排泄後、作動ボタンを押すと「処理を開始します」と音声案内が流れ自動ラップ処理が開始されます。

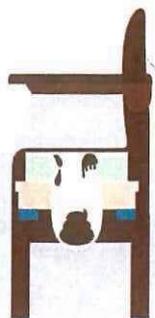

#### 2. フィルム送り

排泄で飛び散った汚れ部分も全てフィルムが送られて閉じ込めます。




#### 3. 熱圧着

排泄物を密封するため熱圧着します。



#### 4. 切り離し

「処理が完了しました。トレーから袋を取り出してください」と音声案内が流れると切り離されて完了です。

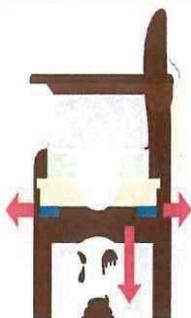

## 使い方はとっても簡単



### 1. 専用凝固剤を入れる

排泄物の水分を凝固させるために使用します。



### 2. 作動ボタンを押す

排泄後、自動でラップを開始します。「処理を開始します」と音声案内が流れます。ラップ終了まで約90秒かかります。処理終了までをリモコンにカウントダウン方式で表示します。



### 3. ラップ済み袋を取り出す

終了音が鳴り、「処理が完了しました。トレーから袋を取り出してください」と音声案内が流れると切り離し完了です。

トレーを引いて、毎回ラップ済み袋を取り出してください。